

FFP


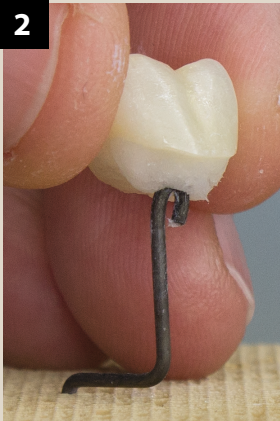
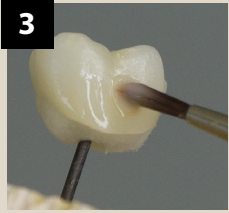
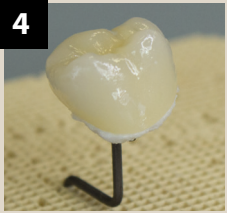
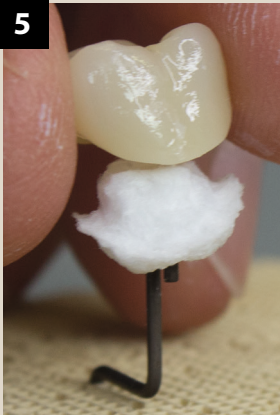
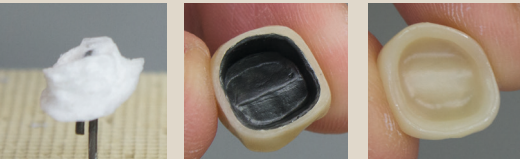

- больше безопасности -
маленький шприц с большим эффектом

excellence
line

Fix Firing Paste - Паста для топливного носителя



Fix Firing Paste - это готовая к применению паста для изготовления индивидуальных трегеров для обжига. С помощью этого огнеупорного материала вкладки, накладки, виниры, коронки и мосты могут быть надежно установлены на штифты или непосредственно зафиксированы на трегере для обжига.

<p>1</p>  <p>Применить Fix Firing Paste непосредственно в керамическую реставрацию</p>	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">- закрепить на штифт- для виниров/вкладок закрепить непосредственно на задней поверхности- также возможно прямое крепление на трегер для обжига <p><u>Пожалуйста, наполните реставрацию для этого немного выше</u></p>	
<p>3</p>  <p>дальнейшие этапы работы например наслоение, покраска ...</p>	<p>4</p>  <p>обжиг</p>	<p>5</p>   <p>После обжига керамики, просто приподнимите реставрацию с штампа из обжиговой ваты.</p> <ul style="list-style-type: none">- легко удаляется- не требует абразивной обработки или соскабливания 

Область применения / свойства:

- Стабилизация трудноисправимых керамических изделий в процессе обжига в керамической печи
- простое применение благодаря готовому к использованию шприцу
- отсутствие обесцвечивания керамики после обжига
- легко удаляется, не требует абразивной обработки или соскабливания
- нет необходимости в увеличении времени предварительной сушки в печи для обжига керамики

содержание / шприц: 12 мл

Fix Firing Paste
Fix Firing Paste (5 шт.)

1 Spritze / 12ml
5 шприцов по 12 мл

Art.: 399-1000
Art.: 399-1005