

K2 MyStains


Conception d'un bridge antérieur
avec partie gingivale



K2 MyStains Peinture




K2 MyStains Structure

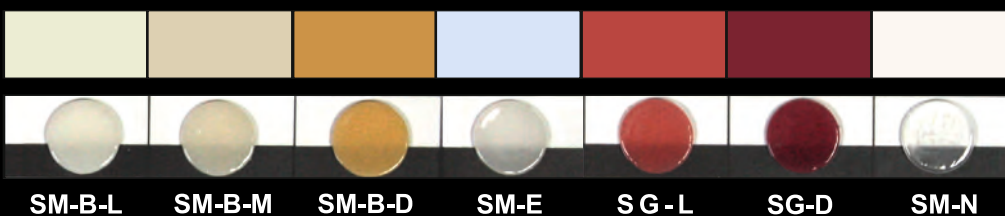


K2 MyStains Poudre de glaçage



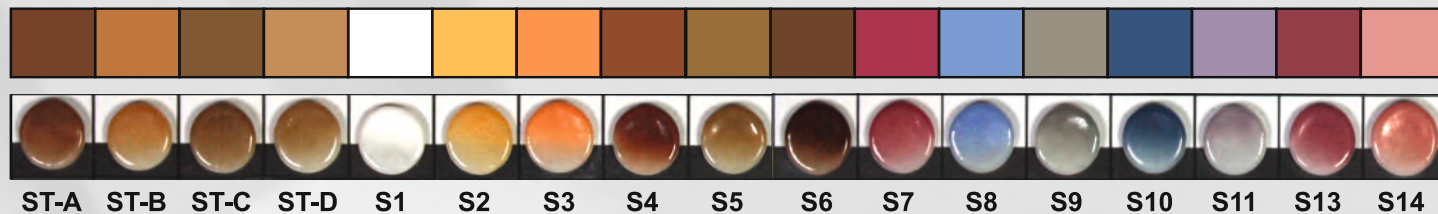


K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure

1. première peinture

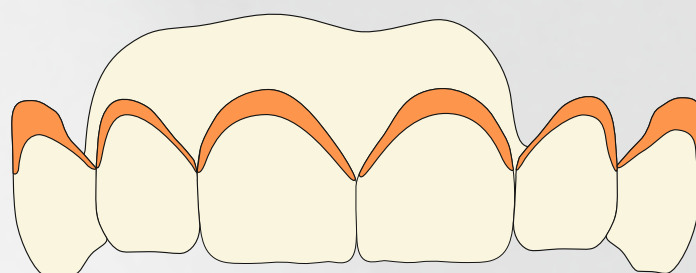


S3
Cou / cervical

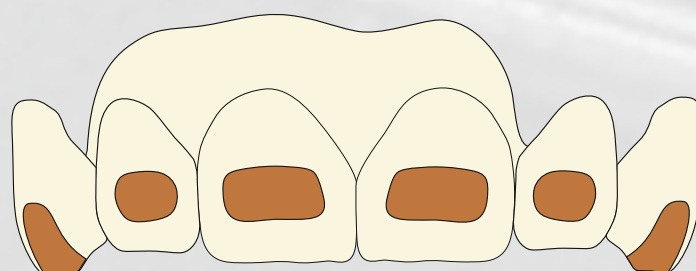


ST-B
dentine labiale



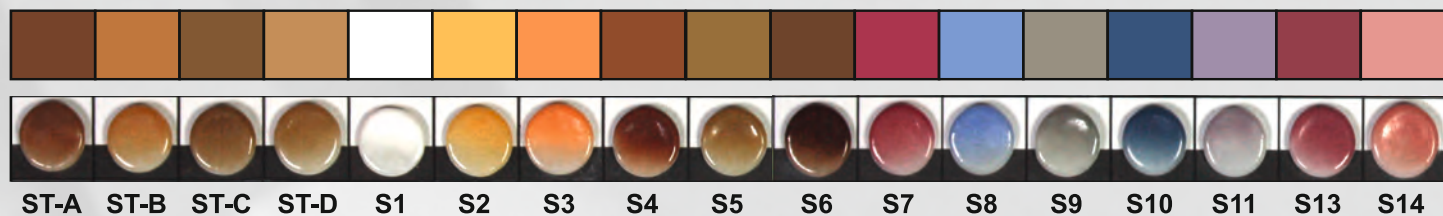


K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure

1. première peinture, labial

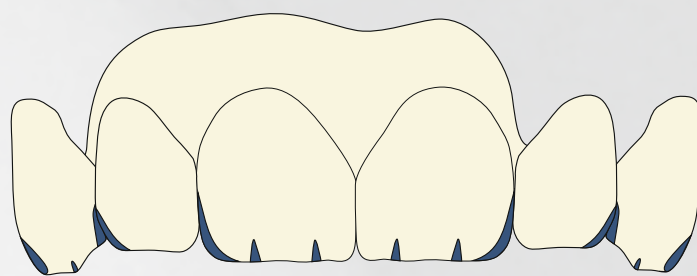


S10

entre Mamelon + distal
appliquer en fine couche, car très intense

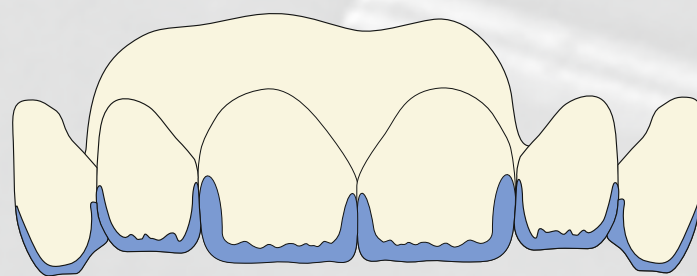




S8




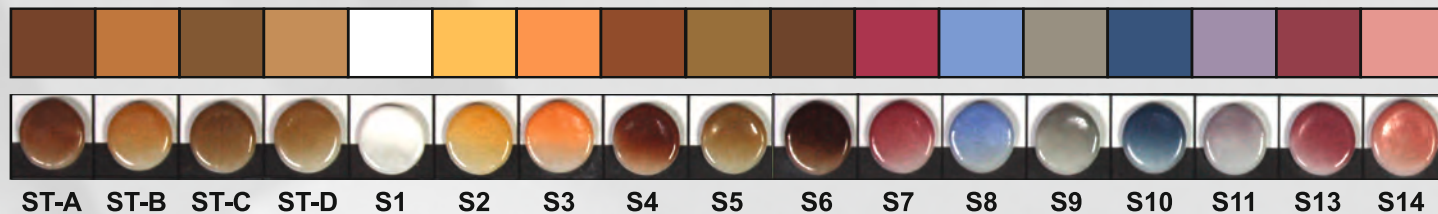

K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure



1. première peinture, labial

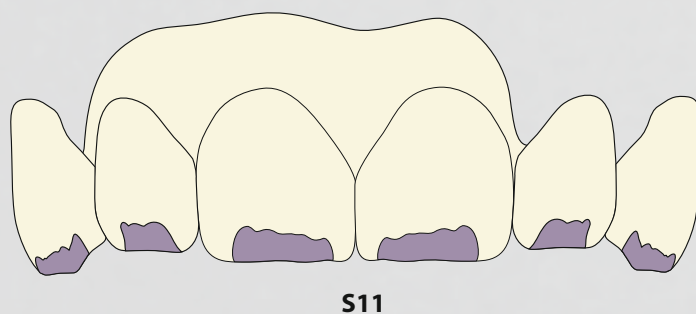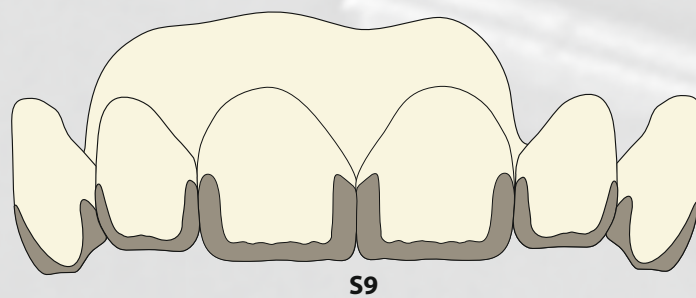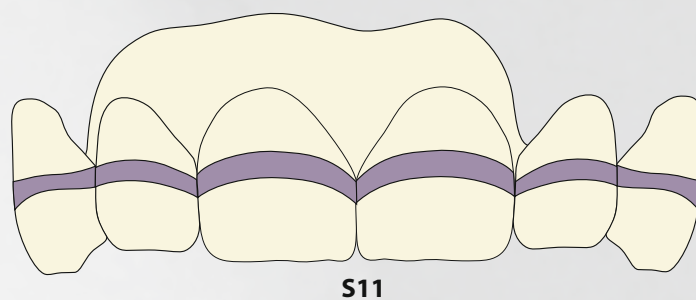


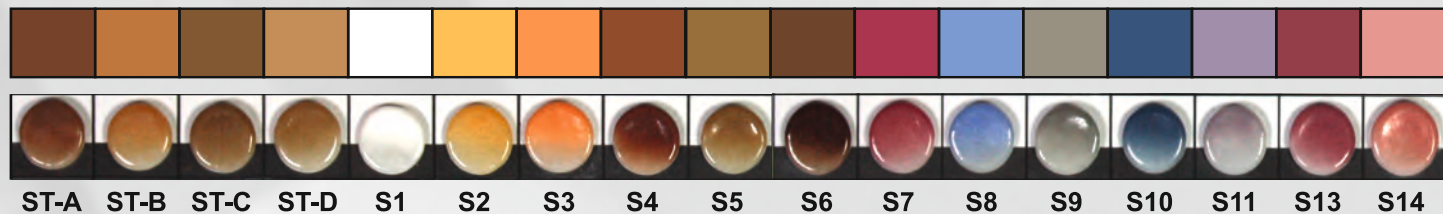


K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure



1. première peinture, palatinale

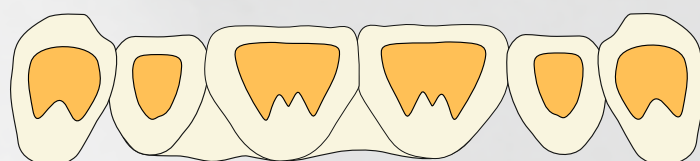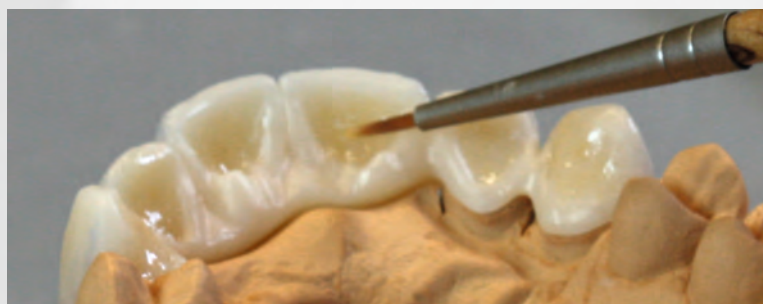


S2

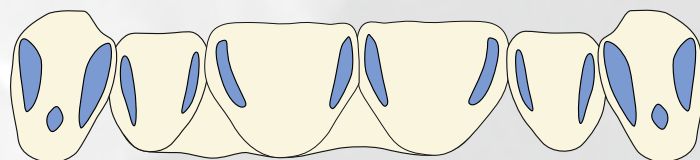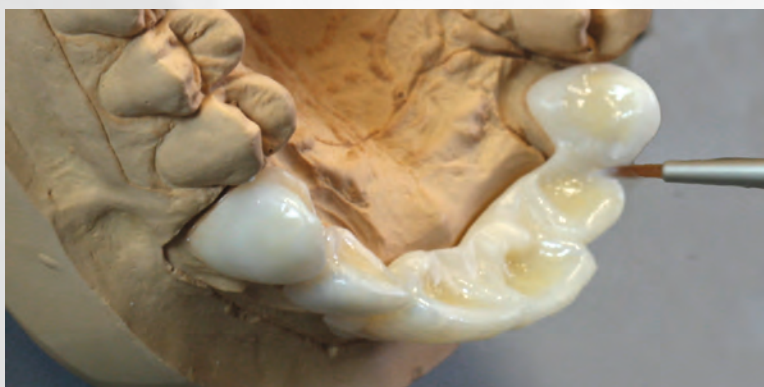

S8


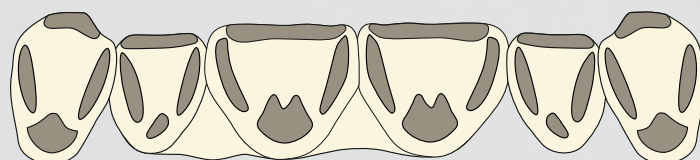
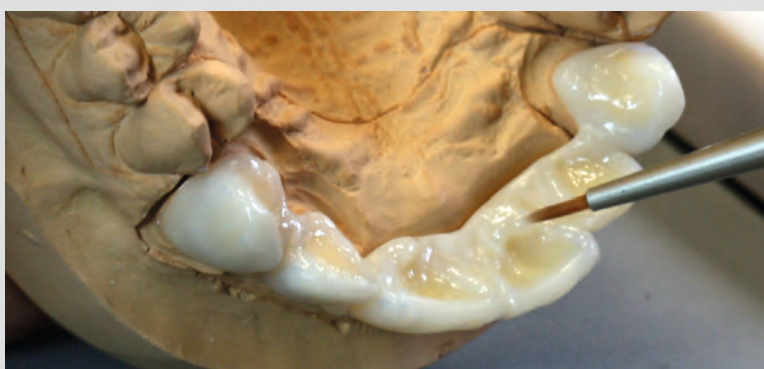



S9

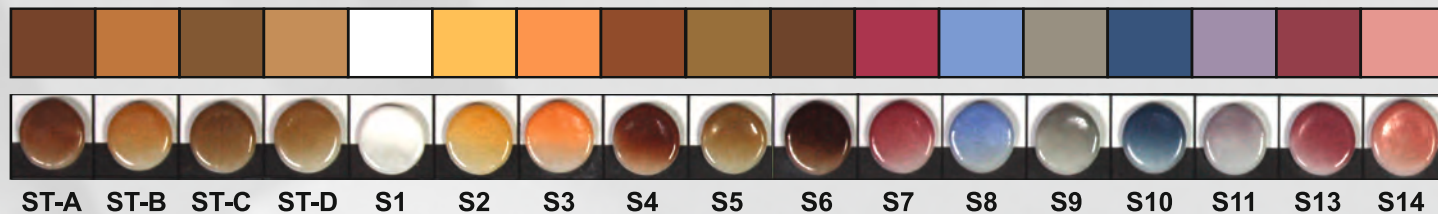

K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure



1. premier maquillage, gingiva labial

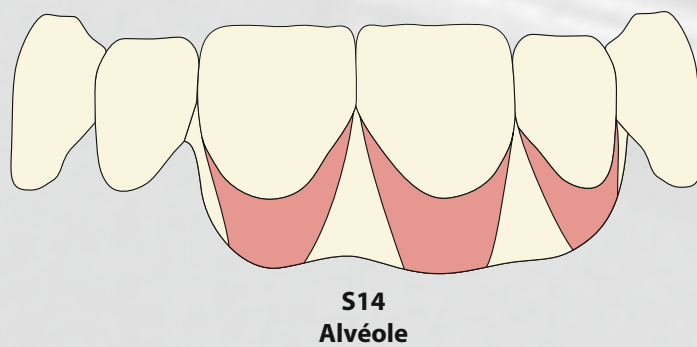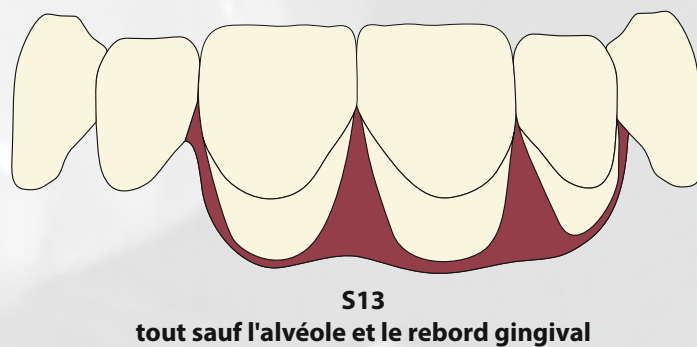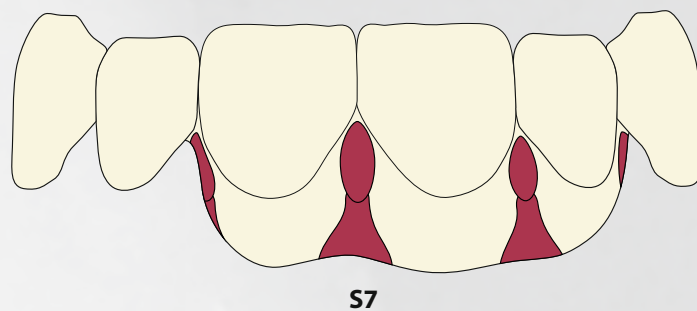


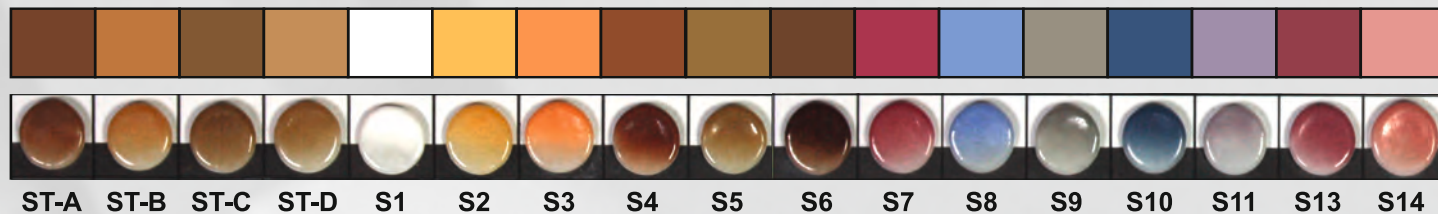



K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure

1. premier maquillage, gingivale palatine

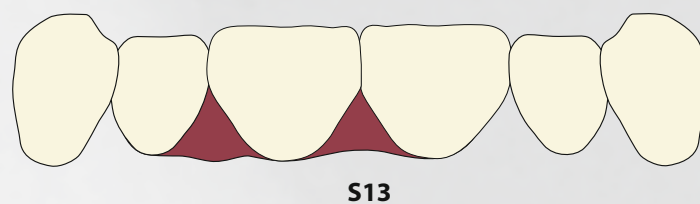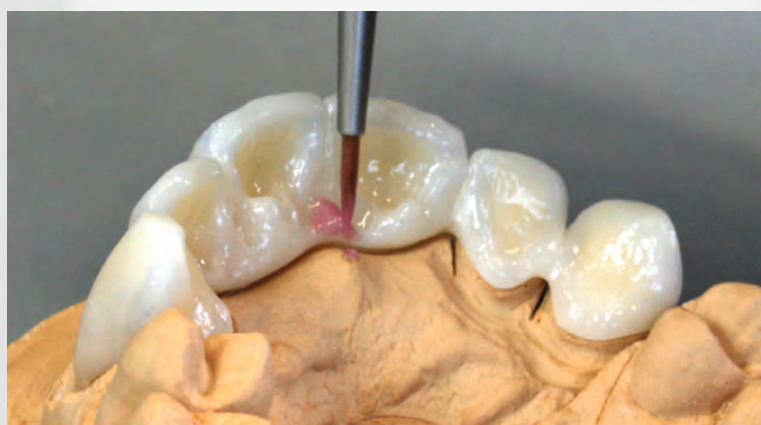

1. première peinture, gingivite basale

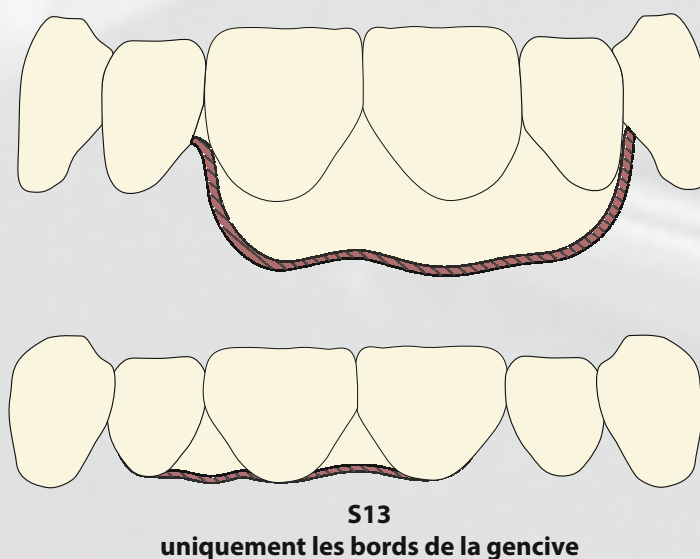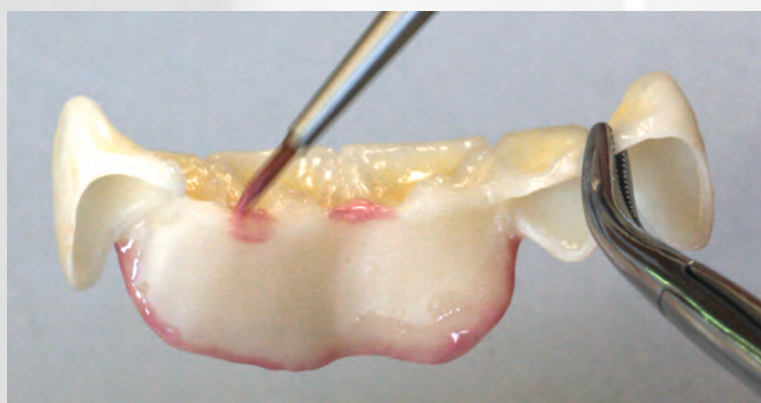


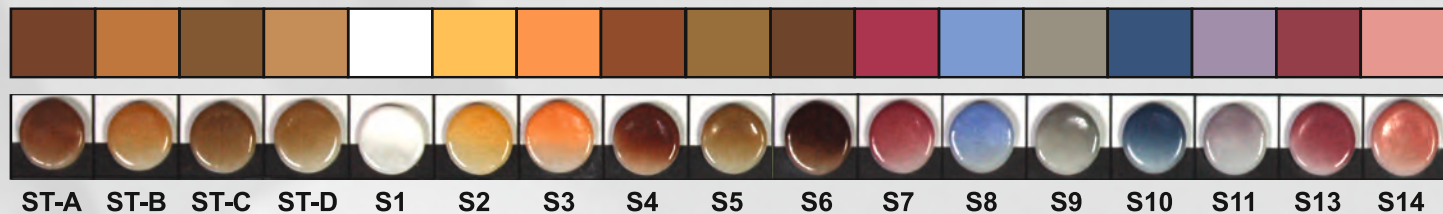

K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure


après le premier incendie



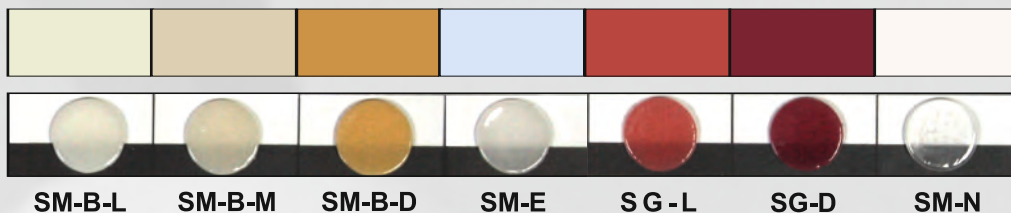


K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure

2. Gencive avec Structure, labial

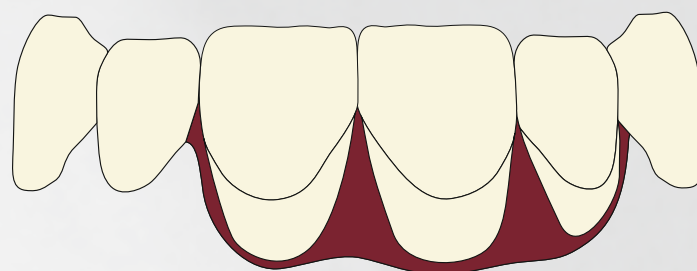

SG-D


Bord de la gencive et tout sauf l'alvéole

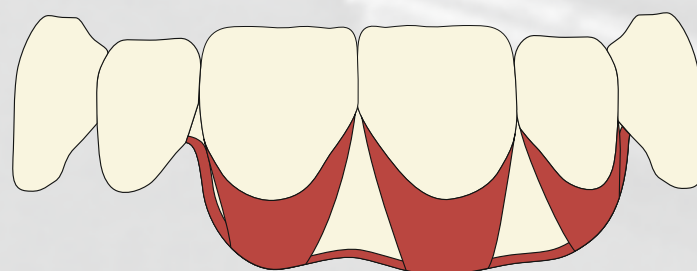

SG-L


Alvéole et sillon gingival



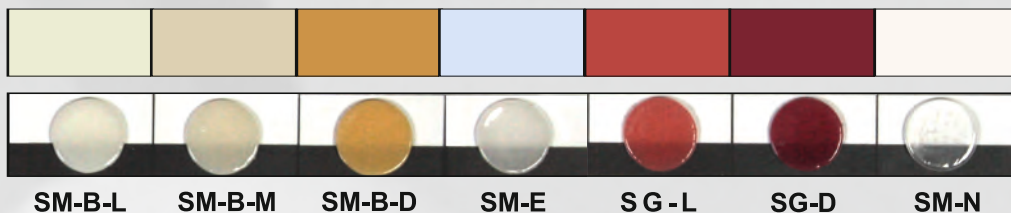

K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure


2. Gencive avec Structure, labial

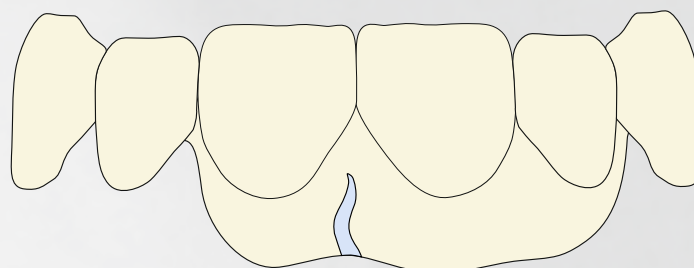


SM-E
Bandeau de lèvres



2. Gencive avec Structure, palatin

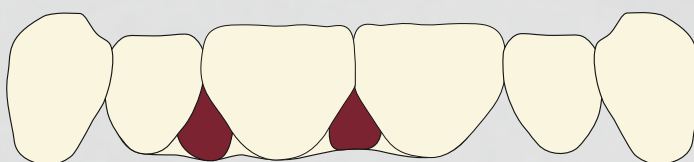

SG-D

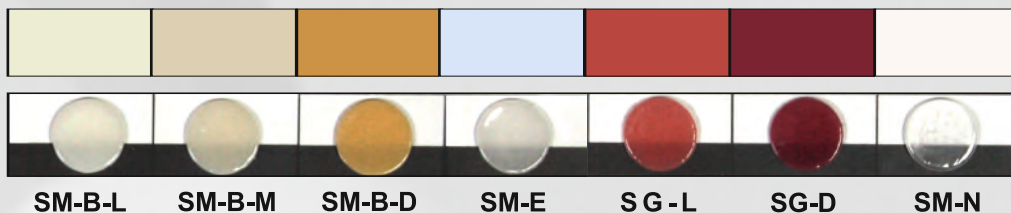

K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure

2. Structure - après l'incendie



**Autres possibilités
de la personnalisation**



dans le guide :

K2 MyStains

Peintures & Structure



avec les peintures K2 MyStain - par ex. créer des mammelons

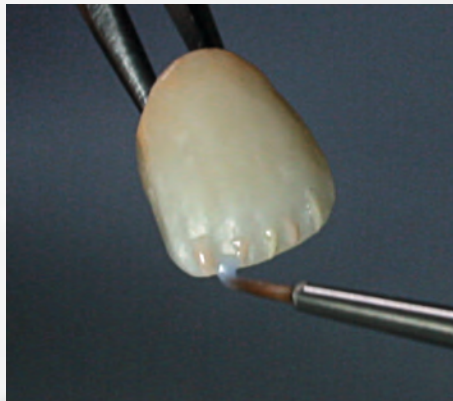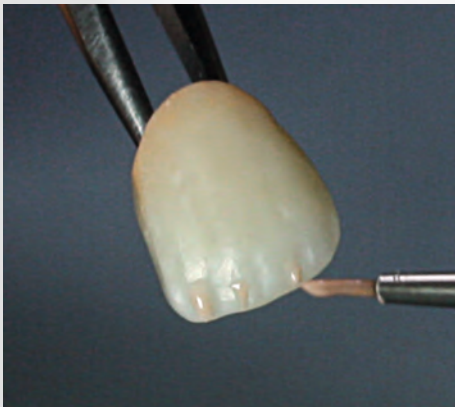



avec K2 MyStain Structure - par ex. aménagement de surface







K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure


3. avant cuisson de glaçage GL / GLF

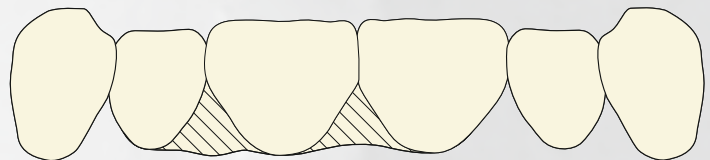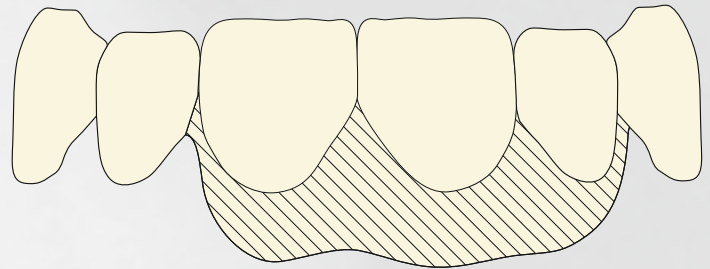

GL
Zones gingivales uniquement avec GL
(pas avec GL-F)

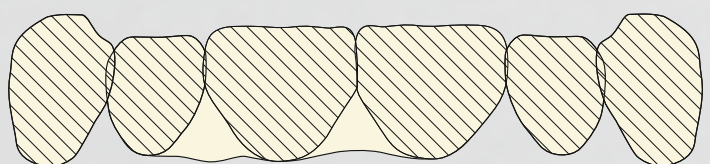
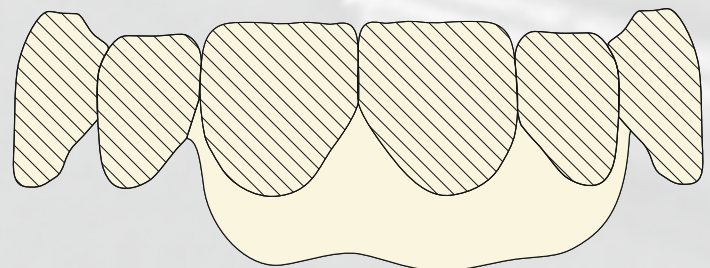


GL-F
Dents et couronnes avec GL -F
(dents mieux fluorées)

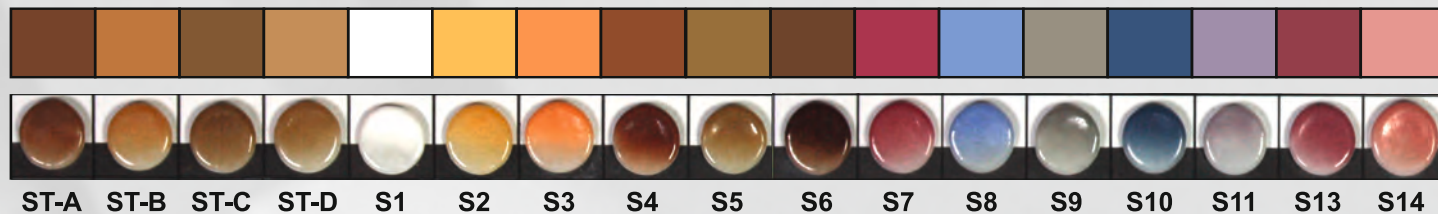


K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure



3. avant la cuisson de glaçage, personnaliser davantage si nécessaire

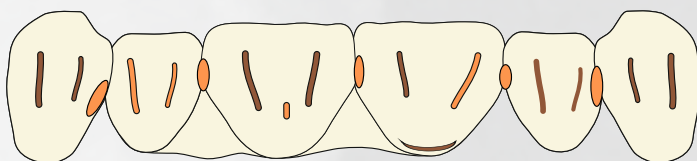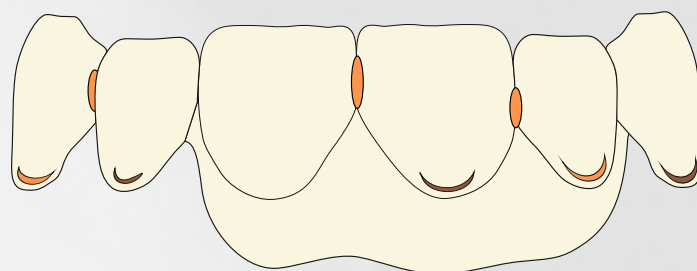

**S2, S3 ou mélange de différentes couleurs
proximal, cervical ou ...**

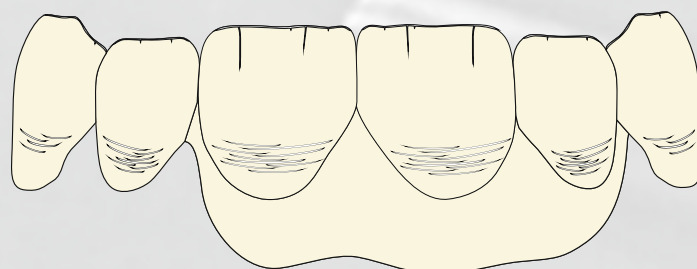

**S1 incisal et labial -
avec précaution, de fines lignes ...**

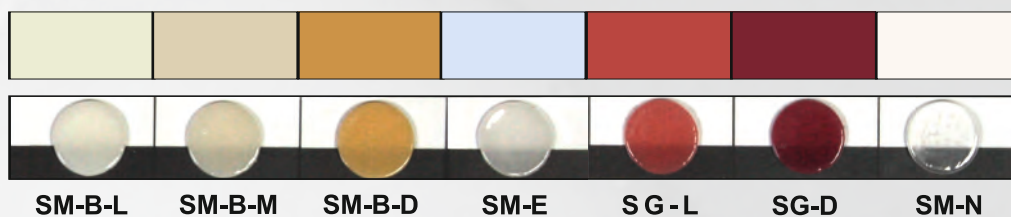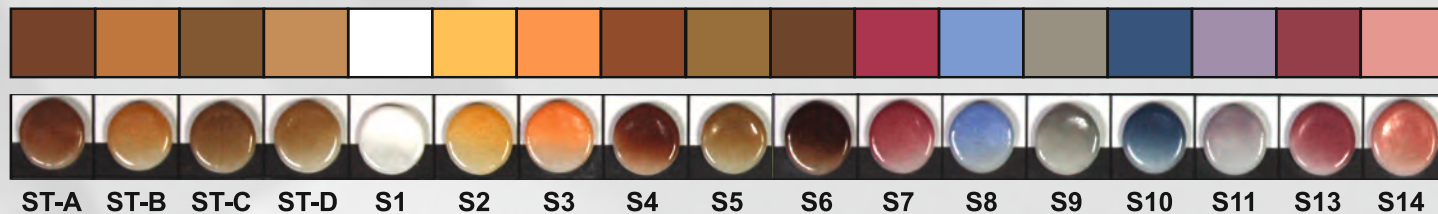

K2 MyStain Peintures + K2 MyStain Structure

Finition après cuisson de glaçage



Tableaux de gravure



Tableau de cuisson pour K2 MyStains - cuisson de glaçage/peinture pour toutes les céramiques mentionnées ci-dessus ainsi que pour le zirconium pur fritté (blanc) et le disilicate de lithium monolithique (pressé)

	Température de démarrage	Séchage	Température de montée	Température finale	Temps de maintien	Vide	Apparence
Céramique à faible fusion (K2 LF)	480°C / 896°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	750°C - 770°C / 1382°F - 1418°F	1 min	Oui	brillant
Céramique à fusion élevée (K2 HF)	480°C / 896°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	860°C - 880°C / 1580°F - 1616°F	1 min	Oui	brillant
Céramique au lithium (K2 Li)	450°C / 842°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	750°C - 780°C / 1382°F - 1436°F	1 min	Oui	brillant
Céramique de zirconium (K2 Zi)	480°C / 896°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	790°C - 810°C / 1454°F - 1490°F	1 min	Oui	brillant
Zirconium Dioxyde (ébauches)	450°C / 842°F	6 min	45°C/min / 113°F/min	800°C - 950°C / 1472°F - 1742°F	1 min	Oui	brillant
Disilicate de lithium (Blocs)	450°C / 842°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	730°C - 780°C / 1346°F - 1436°F	1 min	Oui	brillant

Les paramètres de cuisson indiqués ci-dessus sont des valeurs indicatives qui doivent toujours être adaptées au four de cuisson utilisé et à la situation du four. L'essentiel est d'obtenir un résultat de cuisson correct.

Si le fraisage a été effectué à partir de CAD/CAM bleu, veuillez terminer la cristallisation avant le glaçage.



Tableau de cuisson pour K2 MyStains Structure sur zircon

Préchauffage	Temps de séchage	Heure de fermeture	Taux de montée	Vide	Température de cuisson	Temps de maintien	Longue durée - refroidissement
430°C / 806°F	3 min*	3 min*	40°C/min / 104°F	100%	805°C / 1481°F	1 min	0 - 6 min**


Tableau de cuisson pour K2 MyStains Structure sur disilicate de lithium

430°C / 806°F	3 min*	3 min*	40°C/min / 104°F	100%	775°C / 1427°F	1 min	0 - 6 min**
---------------	--------	--------	------------------	------	----------------	-------	-------------


* pour une épaisseur de couche maximale de 0,5 mm, prolonger à chaque fois de 5 minutes

** pour les restaurations massives, jusqu'à 6 min de refroidissement à long terme

K2 MyStains Peinture

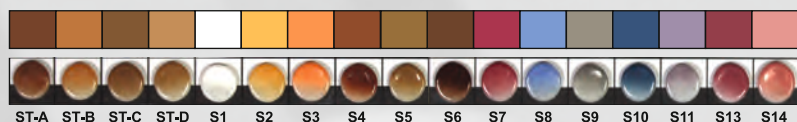

K2 MyStains Structure

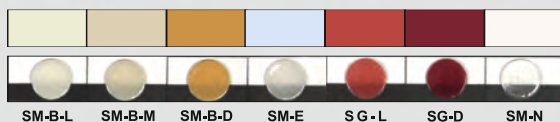

Peintures : K2 MyStains ...

388-0001	... ST-A, 2 g
388-0002	... ST-B, 2 g
388-0003	... ST-C, 2 g
388-0004	... ST-D, 2 g
388-0011	... ST-S1, blanc, 2 g
388-0012	... ST-S2, miel, 2 g
388-0013	... ST-S3, orange, 2 g
388-0014	... ST-S4, beige, 2 g
388-0015	... ST-S5, caramel, 2 g
388-0016	... ST-S6, marron foncé, 2 g
388-0017	... ST-S7, rouge brique, 2 g
388-0018	... ST-S8, bleu ciel, 2 g
388-0019	... ST-S9, gris, 2 g
388-0020	... ST-S10, bleu royal, 2 g
388-0022	... ST-S11, illusion violet, 2 g
388-0023	... ST-S13, rouge uni, 2 g
388-0024	... ST-S14, uni gingiva, 2 g

Masses de structure : K2 MyStains ...

388-0108	... Structure Body light, SM-B-L, 2 g
388-0109	... Structure Body medium, SM-B-M, 2 g
388-0110	... Structure Body dark, SM-B-D, 2 g
388-0111	... Structure Enamel SM-E, 2 g
388-0112	... Structure Gingiva light SG-L, 2 g
388-0113	... Structure Gingiva dark SG-D, 2 g
388-0114	... Structure neutre SM-N, 2 g

Masses de glaçage / liquide : K2 MyStains ...

388-0100	... Glaze Powder, GL, 10 g
388-0101	... Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 10 g
388-0150	... Glaze Standard Liquid GL, 50 ml
388-1150	... Colors-Structure Liquid LL, 50 ml



K2 MyStains Peinture

Les nouveaux colorants K2 MyStains permettent de peindre, de teinter et de personnaliser très facilement les céramiques. Les couleurs, si elles sont mélangées avec le liquide de structure correspondant, "tiennent" très bien et l'effet voulu reste tel qu'il a été appliqué.

K2 MyStains Structure

peuvent être utilisées après les cuissons de peinture. Pour personnaliser la structure de la surface, il est possible d'appliquer jusqu'à 0,5 mm de masse structurée, mais uniquement dans les zones non fonctionnelles.

L'application de petits points de contact est toutefois possible.

Remarque :

- Les masses Structure doivent être mélangées sur une plaque de mélange en verre ou en céramique, pour éviter que le liquide ne soit aspiré
 - Les masses et le liquide doivent être mélangés avec une spatule en agate ou en verre.
 - Tous les MyStains K2 doivent être mélangés exclusivement avec le liquide correspondant.
- L'utilisation d'eau est à proscrire d'urgence !

Utilisation :

Les **maquillants K2 MyStain** sont conçus pour les restaurations monolithiques et toutes les restaurations correspondant au CDT, céramique à bas ou haut point de fusion.

Les **masses de structure** doivent être utilisées exclusivement pour le zircon et le disilicate de lithium.





recommandé :

Fix Firing Paste, pâte pour support de cuisson

Après la cuisson de la céramique Restaurations il suffit de le décoller du moignon de coton à brûler.

- facile à enlever
- pas de rayonnement ou grattage nécessaire

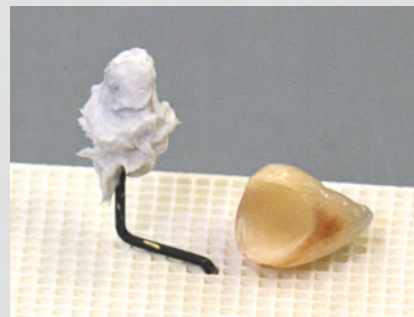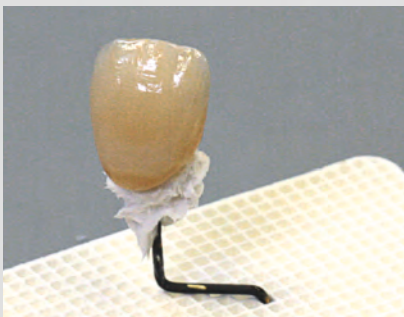



Caram/sta V