

K2 MyStains Microlayering

K2 MyStains Peinture




+















K2 MyStains Poudre de glaçage




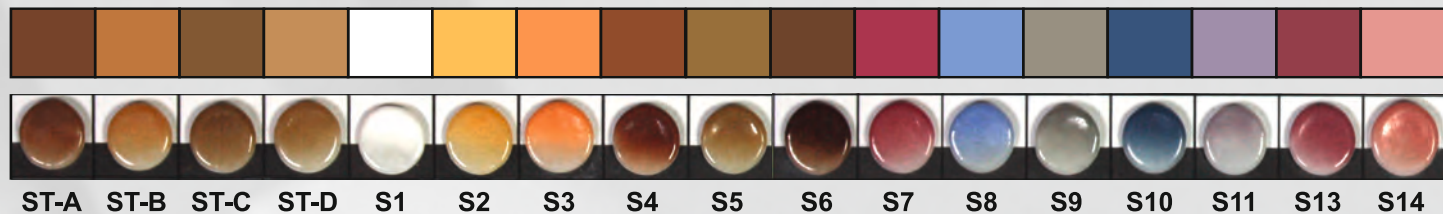

K2 MyStain Peintures



première peinture

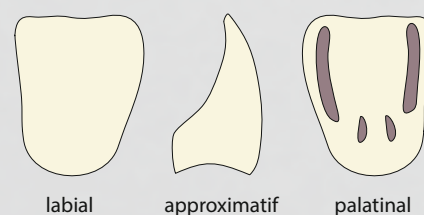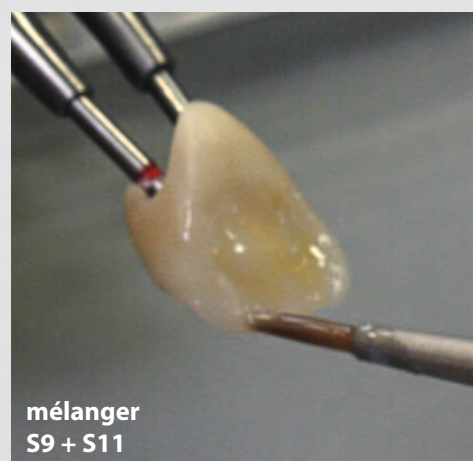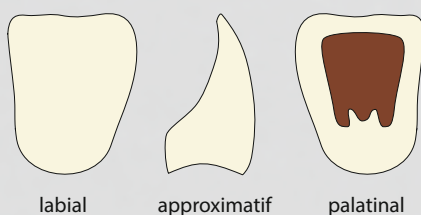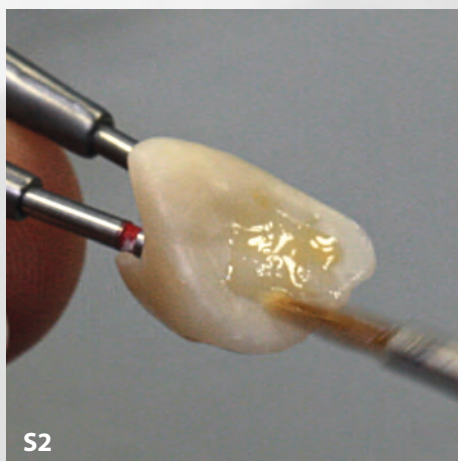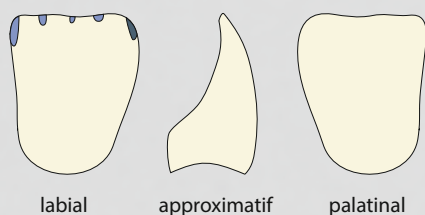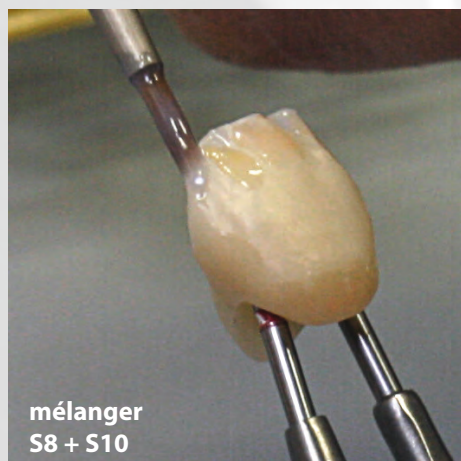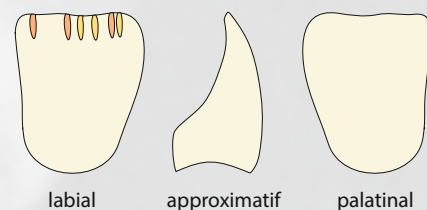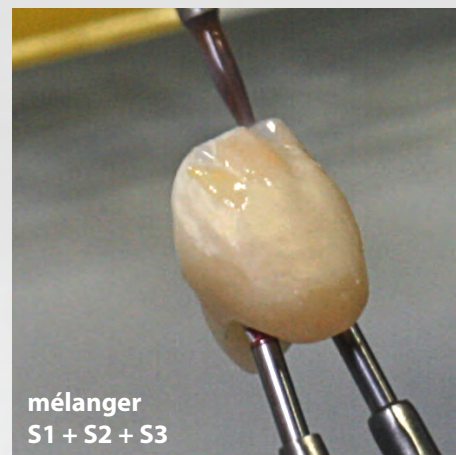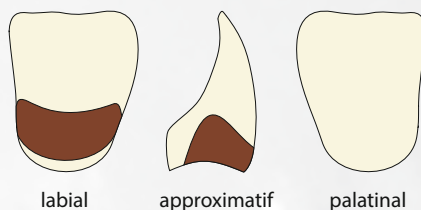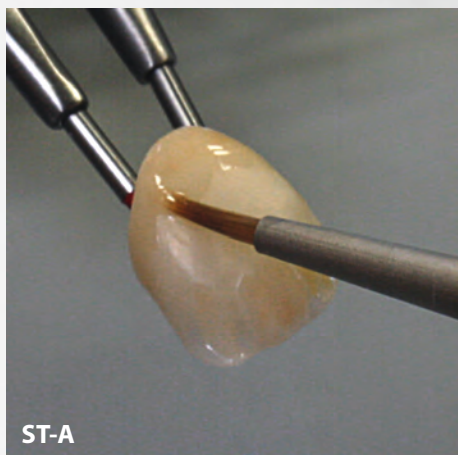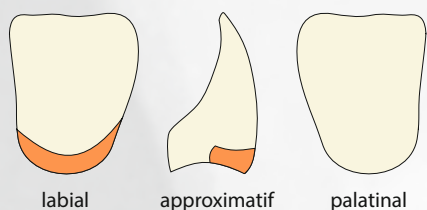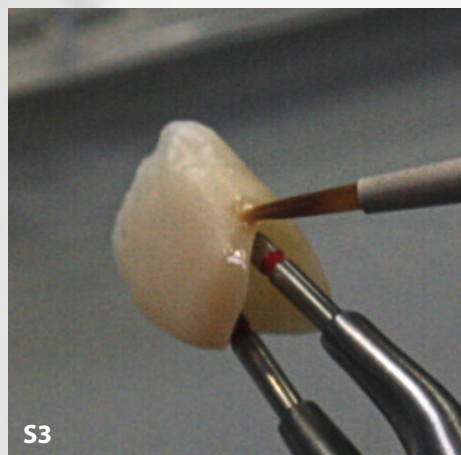


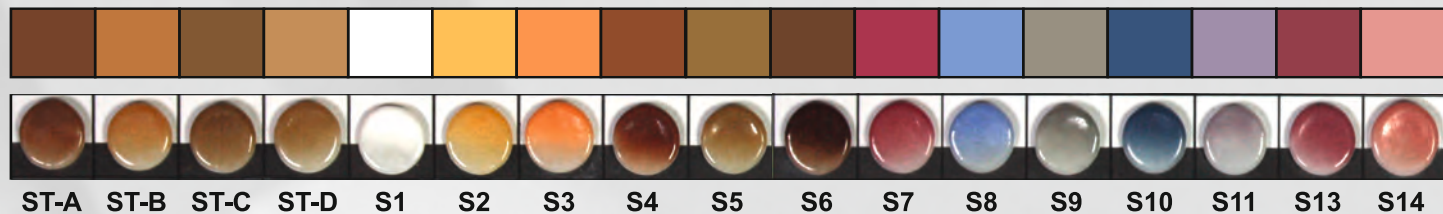

K2 MyStain Peintures




après le premier incendie

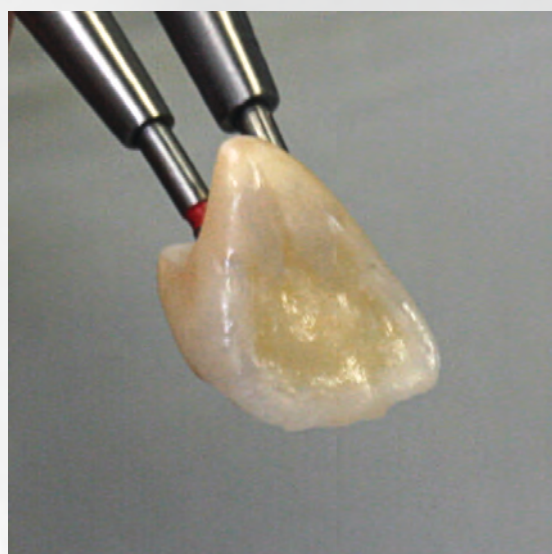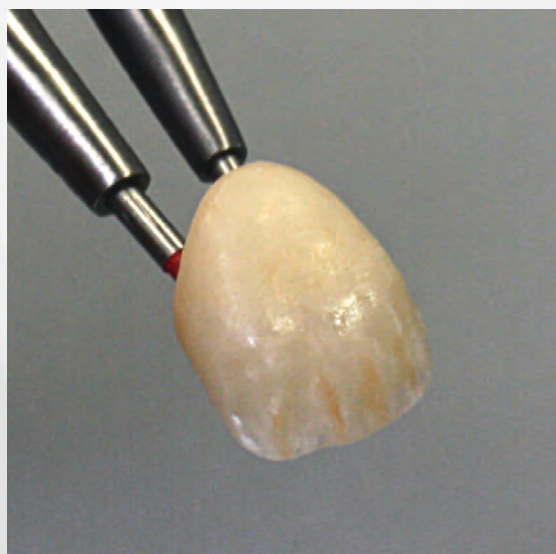

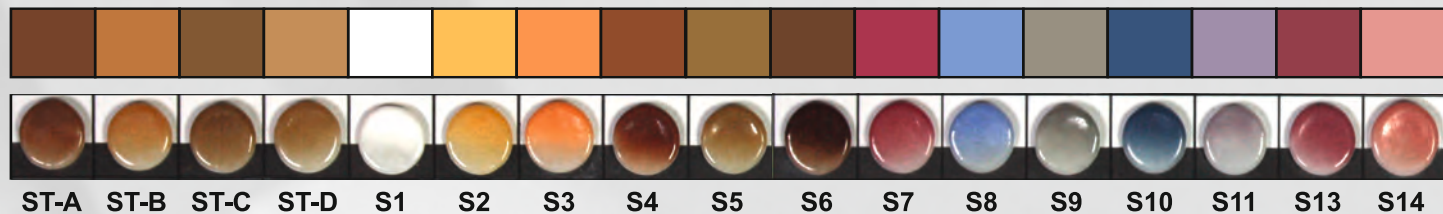

K2 MyStain Peintures


peindre la deuxième

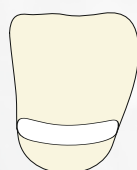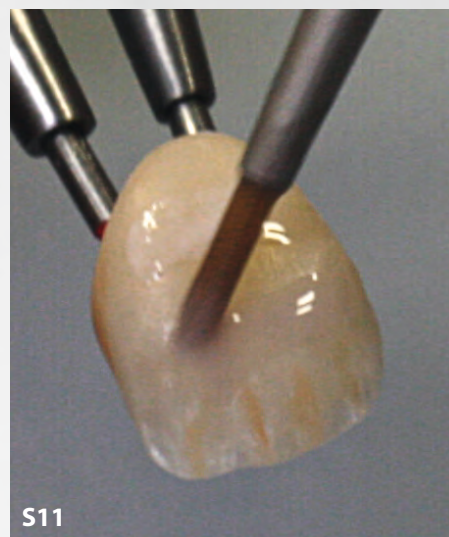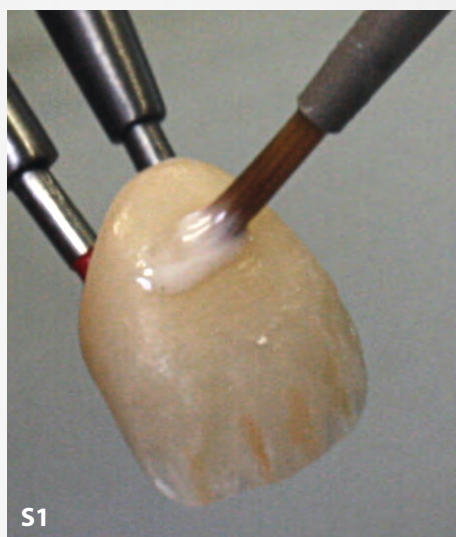


labial



approximatif

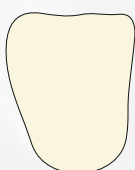


palatinal

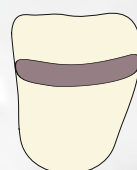



labial



approximatif

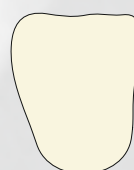

palatinal

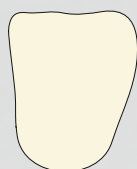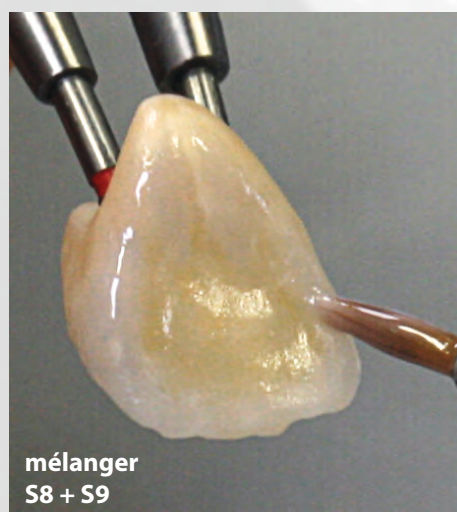


labial



approximatif




palatinal

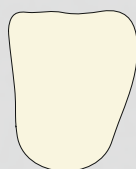


labial



approximatif

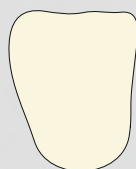

palatinal

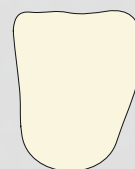


labial



approximatif






palatinal

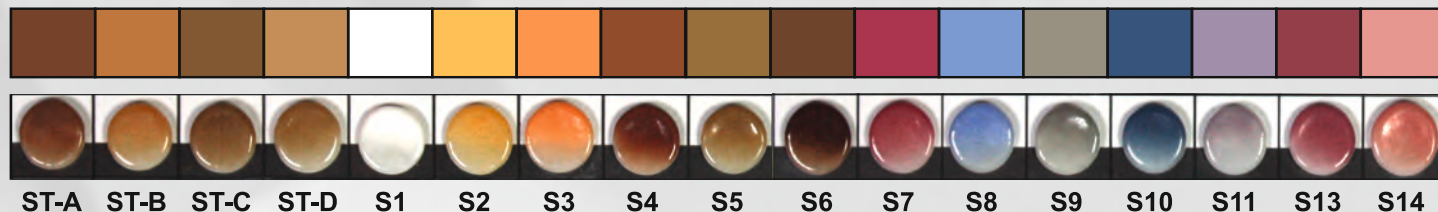


K2 MyStain Peintures

après le deuxième incendie

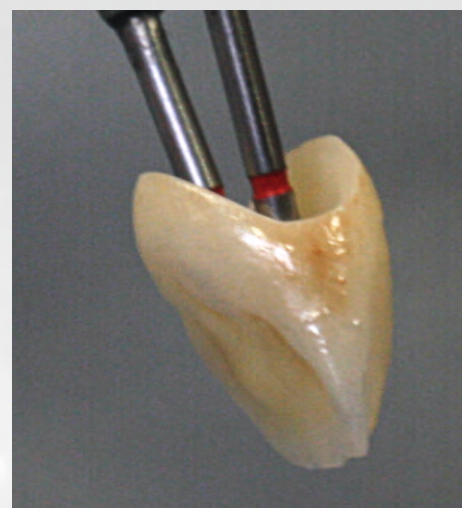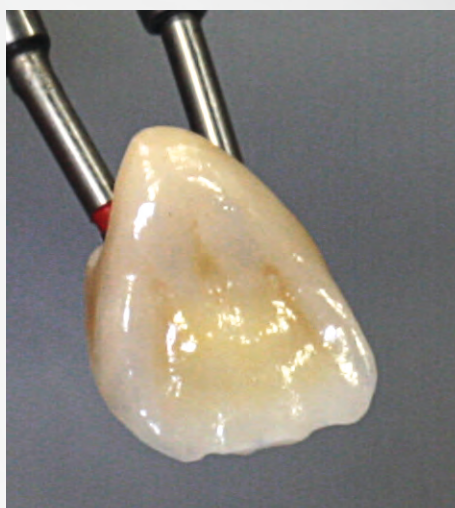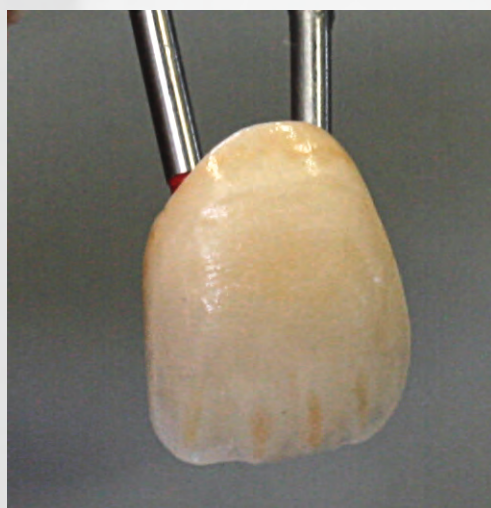

Lorsqu'une épaisseur plus importante (plus de 0,5 mm) est nécessaire avec la micro stratification, K2 MyStains en combinaison avec K2 Li Ceramic offre la combinaison parfaite d'une esthétique naturelle supérieure, d'une vitalité et d'une opalescence supérieures, ainsi que d'une résistance maximale pour les restaurations sans métal.

Lors de la micro stratification de 0,5 mm ou moins, K2 MyStains en combinaison avec K2 MyStains Structure offre des résultats exceptionnels avec une esthétique naturelle et proche de la réalité. Il n'est pas recommandé de dépasser 0,5 mm avec K2 MyStains Structure, car la résistance et l'intégrité de la restauration peuvent être compromises.

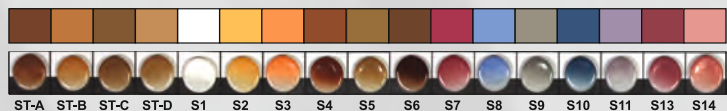

K2 MyStain Peintures


Step 3 - Microlayering avec : K2 Li -Lithium Disilicate Céramique



labial



approximatif

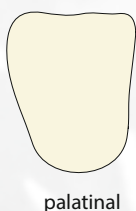


palatinal




labial



approximatif

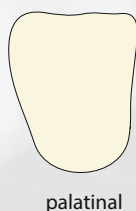


palatinal

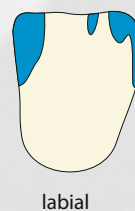

labial




approximatif

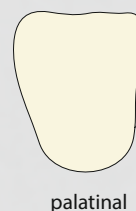

palatinal



E 58 / TN

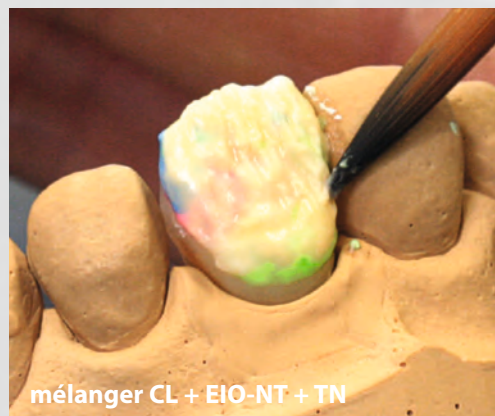


mélanger CL + EIO-NT + TN




labial



approximatif

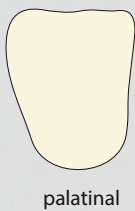


palatinal

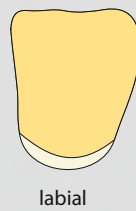


labial



approximatif

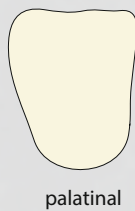



palatinal

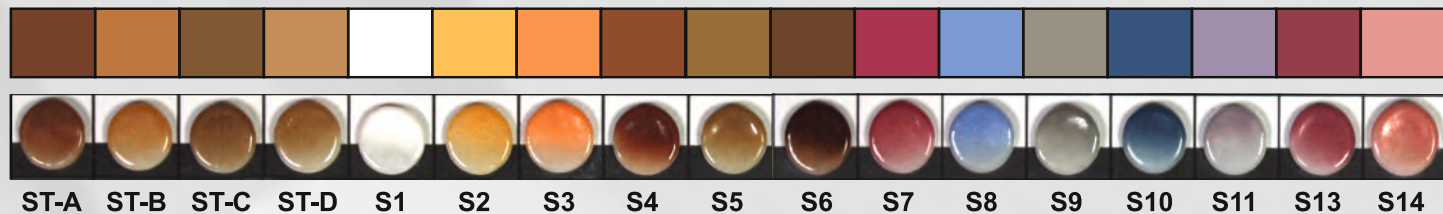

K2 MyStain Peintures


après le troisième incendie

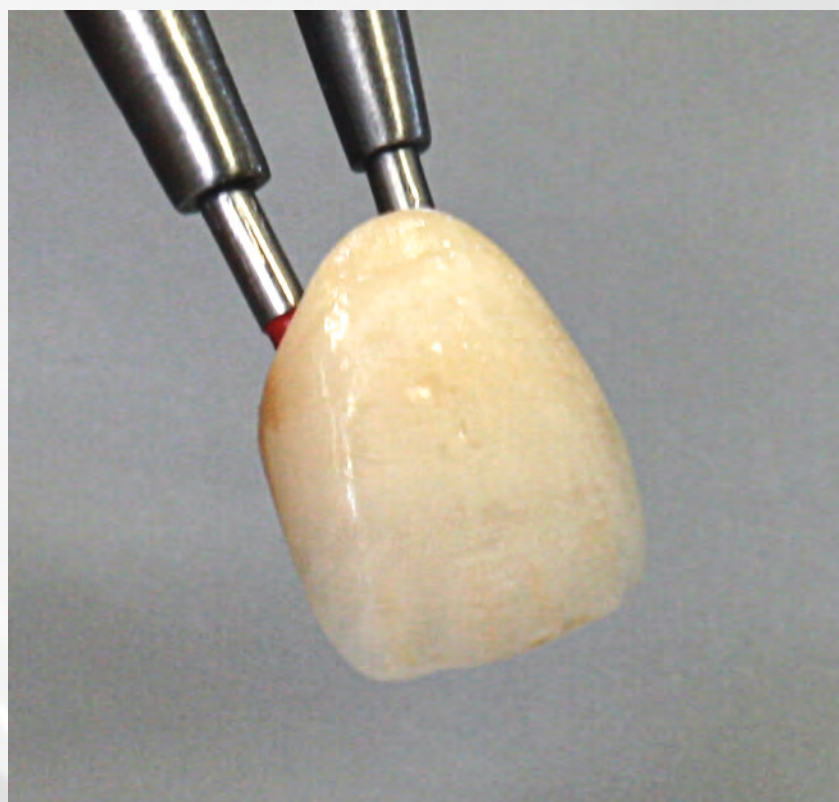

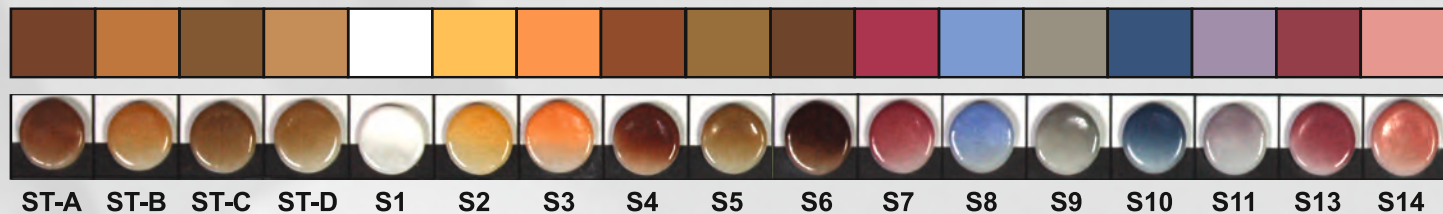


K2 MyStain Peintures

Cuisson de glaçage / finition

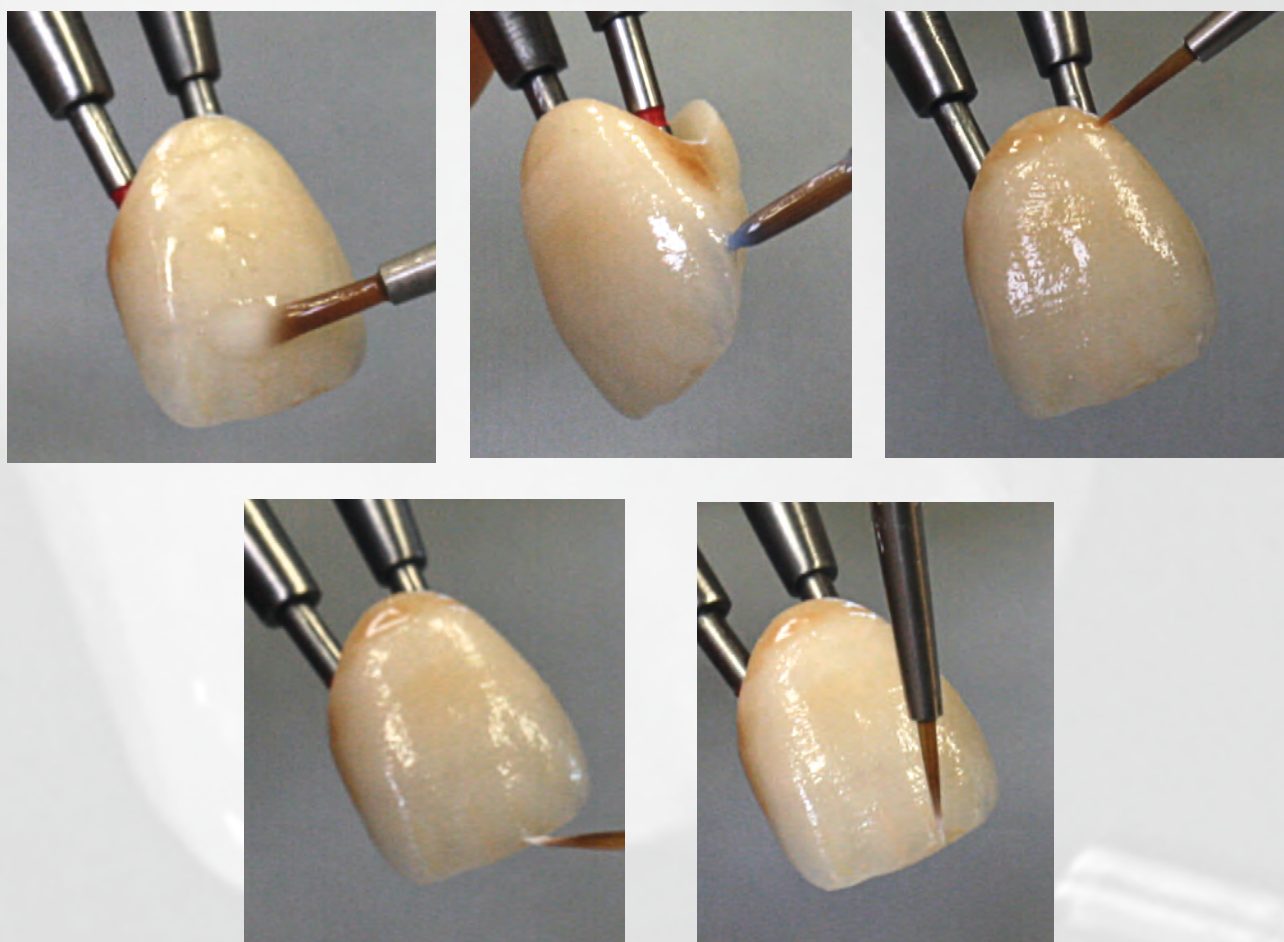


individuel

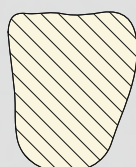


labial



approximatif

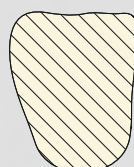


palatinal

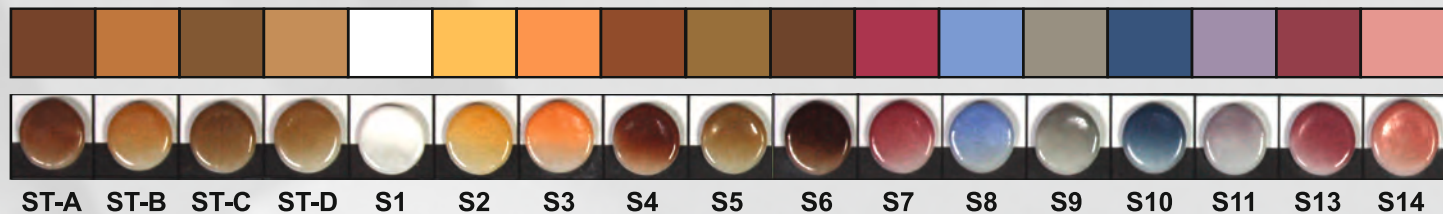

K2 MyStain Peintures

travail fini après 4 cuissons




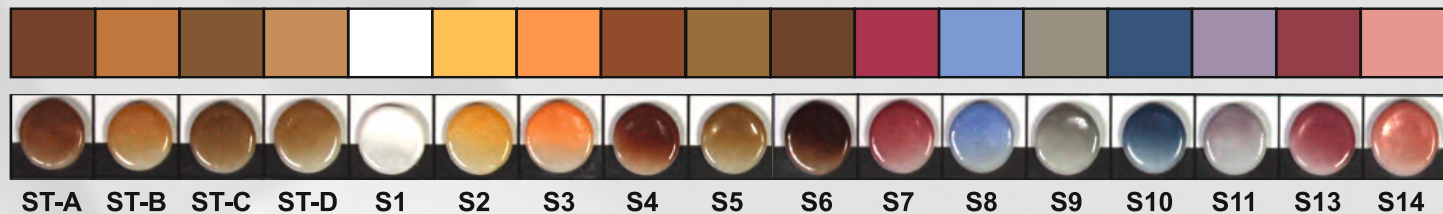

K2 MyStain Peintures

travail fini après 4 cuissons



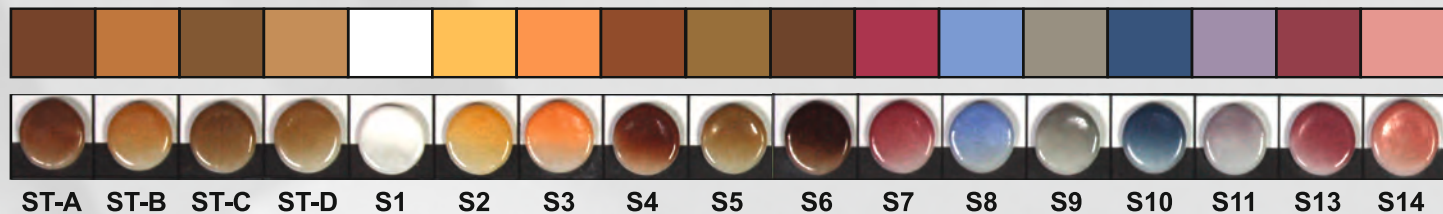

K2 MyStain Peintures

travail fini après 4 cuissons



avant



après

Tableaux de gravure




**Tableau de cuisson pour K2 MyStains - cuisson de glaçage/peinture
pour toutes les céramiques mentionnées ci-dessus ainsi que pour le zirconium pur fritté (blanc) et le disilicate de lithium
monolithique (pressé)**

	Température de démarrage	Séchage	Température de montée	Température finale	Temps de maintien	Vide	Apparence
Céramique à faible fusion (K2 LF)	480°C / 896°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	750°C - 770°C / 1382°F - 1418°F	1 min	Oui	brillant
Céramique à fusion élevée (K2 HF)	480°C / 896°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	860°C - 880°C / 1580°F - 1616°F	1 min	Oui	brillant
Tableau de cuisson Microlayering K2 Li							
Céramique au lithium (K2 Li)	450°C / 842°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	750°C - 780°C / 1382°F - 1436°F	1 min	Oui	brillant
Céramique de zirconium (K2 Zi)	480°C / 896°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	790°C - 810°C / 1454°F - 1490°F	1 min	Oui	brillant
Zirconium Dioxyde (ébauches)	450°C / 842°F	6 min	45°C/min / 113°F/min	800°C - 950°C / 1472°F - 1742°F	1 min	Oui	brillant
Disilicate de lithium (Blocs)	450°C / 842°F	4 min	45°C/min / 113°F/min	730°C - 780°C / 1346°F - 1436°F	1 min	Oui	brillant


Les paramètres de cuisson indiqués ci-dessus sont des valeurs indicatives qui doivent toujours être adaptées au four de cuisson utilisé et à la situation du four. L'essentiel est d'obtenir un résultat de cuisson correct.

Si le fraisage a été effectué à partir de CAD/CAM bleu, veuillez terminer la cristallisation avant le glaçage.

K2 MyStains Peinture

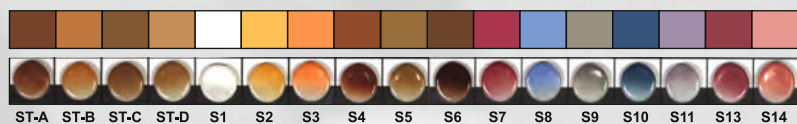

K2 MyStains Structure

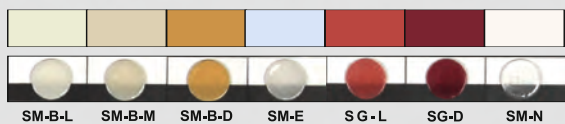

Peintures : K2 MyStains ...	
388-0001	... ST-A, 2 g
388-0002	... ST-B, 2 g
388-0003	... ST-C, 2 g
388-0004	... ST-D, 2 g
388-0011	... ST-S1, blanc, 2 g
388-0012	... ST-S2, miel, 2 g
388-0013	... ST-S3, orange, 2 g
388-0014	... ST-S4, beige, 2 g
388-0015	... ST-S5, caramel, 2 g
388-0016	... ST-S6, marron foncé, 2 g
388-0017	... ST-S7, rouge brique, 2 g
388-0018	... ST-S8, bleu ciel, 2 g
388-0019	... ST-S9, gris, 2 g
388-0020	... ST-S10, bleu royal, 2 g
388-0022	... ST-S11, illusion violet, 2 g
388-0023	... ST-S13, rouge uni, 2 g
388-0024	... ST-S14, uni gingiva, 2 g

Masses de structure : K2 MyStains ...	
388-0108	... Structure Body light, SM-B-L, 2 g
388-0109	... Structure Body medium, SM-B-M, 2 g
388-0110	... Structure Body dark, SM-B-D, 2 g
388-0111	... Structure Enamel SM-E, 2 g
388-0112	... Structure Gingiva light SG-L, 2 g
388-0113	... Structure Gingiva dark SG-D, 2 g
388-0114	... Structure neutre SM-N, 2 g

Masses de glaçage / liquide : K2 MyStains ...	
388-0100	... Glaze Powder, GL, 10 g
388-0101	... Glaze Powder, GL-F (fluorescent), 10 g
388-0150	... Glaze Standard Liquid GL, 50 ml
388-1150	... Colors-Structure Liquid LL, 50 ml



K2 MyStains Peinture

Les nouveaux colorants K2 MyStains permettent de peindre, de teinter et de personnaliser très facilement les céramiques. Les couleurs, si elles sont mélangées avec le liquide de structure correspondant, "tiennent" très bien et l'effet voulu reste tel qu'il a été appliqué.

K2 MyStains Structure

peuvent être utilisées après les cuissons de peinture. Pour personnaliser la structure de la surface, il est possible d'appliquer jusqu'à 0,5 mm de masse structurée, mais uniquement dans les zones non fonctionnelles.

L'application de petits points de contact est toutefois possible.

Remarque :

- Les masses Structure doivent être mélangées sur une plaque de mélange en verre ou en céramique, pour éviter que le liquide ne soit aspiré
 - Les masses et le liquide doivent être mélangés avec une spatule en agate ou en verre.
 - Tous les MyStains K2 doivent être mélangés exclusivement avec le liquide correspondant.
- L'utilisation d'eau est à proscrire d'urgence !

Utilisation :

Les **maquillants K2 MyStain** sont conçus pour les restaurations monolithiques et toutes les restaurations correspondant au CDT, céramique à bas ou haut point de fusion.

Les **masses de structure** doivent être utilisées exclusivement pour le zircon et le disilicate de lithium.





recommandé :

Fix Firing Paste, pâte pour support de cuisson

Après la cuisson de la céramique Restaurations il suffit de le décoller du moignon de coton à brûler.

- facile à enlever
- pas de rayonnement ou grattage nécessaire

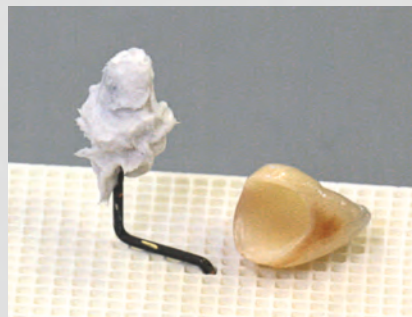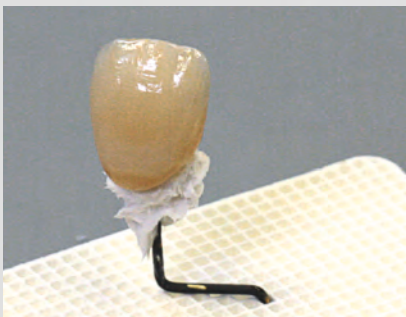



Micro-layering: K2 MyStains and K2 Li Ceramic

