



Mindeststärke Gerüst/Maximale Schichtstärke Verblendkeramik

Maximale Schichtstärke der Verblendkeramik	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4
Mindeststärke des gepressten Gerüsts	0,6	0,8	1	1,1	1,3	1,6

Die Angaben sind in mm

Das gepresste Gerüst darf nie dünner sein als die Schichtstärke der Verblendkeramik!

Es sorgt für die Stabilität der Restauration!

Der gepresste Anteil sollte mindestens 50% der Gesamtstärke der Restauration betragen!

Werden die Kriterien nicht eingehalten, kann dies zu Sprüngen oder dem Bruch der Restauration führen!