

Anstiften K2 Li Wachsmodellationen

Wachsdraht Durchmesser	2,5 - 3mm
Länge des Wachsdrahtes	5 - 8mm
Länge inklusive Wachsmodellation	max. 16mm
Anstiften an Einzelmodellation	Immer am dicksten Bereich der Modellation Frontzähne: incisal Seitenzähne: am Höcker
Anstiften bei Brücken	nur am Pfeiler, niemals am Brückenglied
Anstiftwinkel Modellation	Axial, in Pressrichtung
Anstiftwinkel an der Zylinderbasis	45°
Abstand zwischen den Objekten	min. 3mm
Abstand nach oben	min. 10mm
Abstand zum Silikonring	min. 5mm

Die Presskanäle immer in Pressrichtung der Keramik und am dicksten Teil des Wachsobjektes anbringen! Incisal oder Höcker!

Bei nur einem Objekt immer Blindkanal in gleicher Höhe anstiften!

Unterschiedliche Wachsobjekte immer in gleicher Höhe anstiften!